


## ETHYLOTEST

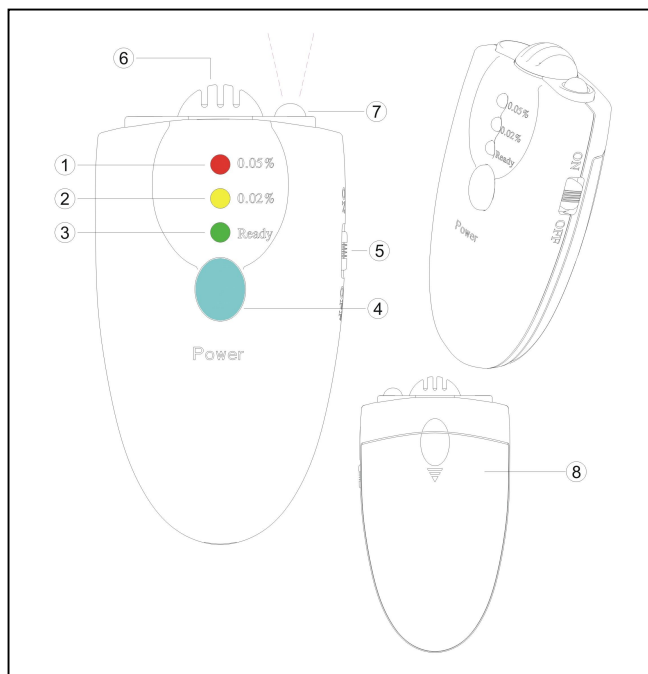

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Lumière rouge               | 5. Commutateur de torche  |
| 2. Lumière jaune               | 6. Détecteur de souffle   |
| 3. Lumière verte               | 7. Lumière de contact     |
| 4. Interrupteur mise en marche | 8. Emplacement pour piles |

### DISPOSITIFS :

- Alcootest à 2 étapes
- Manipulation aisée
- Résultat direct et rapide
- Mise hors tension automatique
- Indication piles faibles
- Fonction torche
- Porte clé
- Utilisation de piles « AAA » (UM-4, incluses)

**! A la première utilisation, Retirer la pastille qui se trouve dans le compartiment Piles appuyer sur POWER puis attendre 60 secondes**

### LE TEST

1. Appuyer sur le bouton **power** pour mettre en route la fonction test.
2. La lumière verte va clignoter, 12 secondes après, la lumière verte reste fixe, l'appareil est prêt pour le test.
3. Souffler à 5 cm du détecteur de souffle pendant 4 secondes et attendez le résultat du test.
4. Résultat du test :
  - Lumière verte → Résultat négatif
  - Lumière jaune → 0.20 g/litre de sang ou 0.10 mg/litre d'air expiré
  - Lumière rouge → 0.50 g/litre de sang ou 0.25 mg/litre d'air expiré.

**LE BOUTON « POWER » DOIT RESTER ENFONCE PENDANT TOUTE LA DUREE DU TEST.**

### MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE :

L'alcootest se mettra hors tension automatiquement 30 secondes après la mise sous tension.

### INDICATEUR DE PUISSANCE DES PILES :

La lumière verte clignote continuellement lorsque les piles sont faibles, remplacez les anciennes piles.

### FONCTION TORCHE :

Positionnez le commutateur torche sur la position ON pour allumer la lampe.

### ATTENTION :

1. Des conditions atmosphériques extérieures peuvent influencer le résultat.
2. Le résultat peut varier en fonction de chaque personne. Ceci n'est qu'une référence.
3. L'indication du produit n'a aucune valeur légale.
4. TVM International n'est en aucun cas responsable de l'indication donnée par l'appareil, donc d'aucune manière responsable de la fiabilité du résultat donné, le conducteur étant le seul responsable de ses actes.
5. Afin d'optimiser le test, il est indispensable de ne rien absorber dans les 10 mn précédant la mesure, en effet café, chocolat, thé, bonbons à la menthe par exemple, peuvent en modifier le résultat.

Importé par **TVM International** 65 Avenue du Gers 31270 FROUZINS  
Tél. +33 (0)5 61 92 33 89 Fax. +33 (0)5 61 86 06 42